

## Методика отбора, подготовки и транспортировки проб молока в лабораторию

В качестве био-пробы для проведения исследования по комплексному выявлению возбудителей мастита крупного рогатого скота используется цельное молоко без использования консервантов.

### ПОДГОТОВКА ПРОБ:

перед отбором проб сосок очищают, сдаивают три-четыре струйки, дезинфицируют, опять сдаивают и только потом отбирают молоко.

В процессе взятия каждую пробу подписывают индивидуальным номером.

Отбирают молоко только в стерильные пробирки и надев на руки перчатки.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При доставке материала для исследований, Заказчик обязан соблюдать правила хранения и транспортировки. Хранение биологического материала при комнатной температуре не более 6 часов, при температуре 2-8оС – 48 часов. При необходимости более длительного хранения материала образцы помещают в морозильную камеру - при температуре не выше минус 18 оС на срок, не превышающий 1 месяц. Не допускается повторное замораживание и размораживание образцов. Транспортировка биоматериала осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими элементами или в термосе со льдом при температуре 2-8оС.

